


## FUERZA FLEXIBLE. ÉXITO COMPROBADO.

Resultados clínicos duraderos a largo plazo comprobados en el tratamiento de la enfermedad oclusiva aortoiliaca compleja (EAO) a lo largo de **cinco años**.

### Efectividad clínica sostenida a lo largo de cinco años:

- 89.5% de permeabilidad primaria y 96.1% permeabilidad primaria asistida por lesión<sup>1</sup>
- 89.1% ausencia de revascularización de la lesión diana (ARLD) por sujeto<sup>1</sup>

Este estudio iniciado por médicos enlistó a 59 pacientes de tres centros participantes; con pacientes monitoreados por **cinco años y más**.

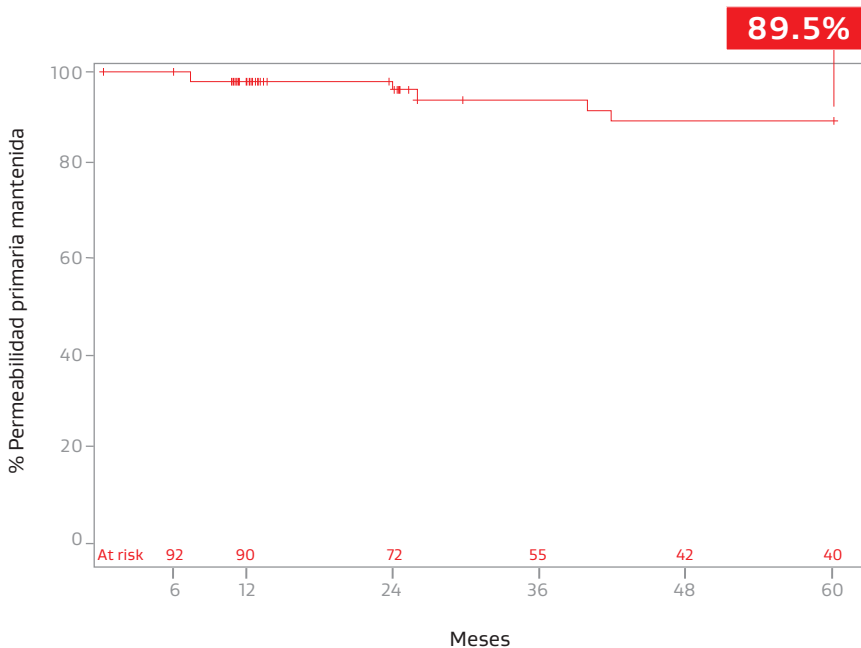

Gráfica de Kaplan-Meier de la permeabilidad primaria con número de lesiones en riesgo

# BENEFICIO DURADERO PARA EL PACIENTE VS LA BASE DE REFERENCIA DE MÁS DE CINCO AÑOS<sup>1</sup>

**89%** de los pacientes mejoraron  $\geq 1$  en la categoría Rutherford a partir de su base de referencia<sup>1</sup>

**.15** de mejoría en la media del índice de tobillo-brazo normal en reposo (ITB) ( $P < .001$ , .95 media ITB)<sup>\*,1</sup>

Mejora de 3x en la media del cuestionario de deterioro de la marcha (WIQ por sus siglas en inglés), medidas sostenidas más allá de cinco años en el cohorte de seguimiento a largo plazo<sup>1</sup>

	Pre-procedimiento	3 años	5 años <sup>†</sup>
Distancia al caminar	7 (N = 59)	25 (N = 39)	21 (N = 27)
Velocidad al caminar	3 (N = 59)	10 (N = 39)	9 (N = 27)
Subir escaleras	3 (N = 50)	11 (N = 38)	9 (N = 27)

\* ( $P < .001$ ) Cambio estadísticamente significativo del pre-procedimiento.

† Seguimiento medio de 6.6 años.



## Referencia

1. Holden A, Takele E, Hill A, et al. Seguimiento a largo plazo de sujetos con la enfermedad aortoiliaca oclusiva tratados con VIABAHN VBX balloon expandable endoprosthesis. Presentado en la Sociedad de Radiología Cardiovascular e Intervencionista (CIRSE) 2022; Septiembre 10-14, 2022; Barcelona, España. *CardioVascular & Interventional Radiology* 2022;45: Suplemento: S147. Abstracto 301.1.

 Consult Instructions for Use  
[eifu.goremedical.com](http://eifu.goremedical.com)

Consulte las *Instrucciones de Uso* en [eifu.goremedical.com](http://eifu.goremedical.com) para una completa descripción de todas las indicaciones aplicables, advertencias, precauciones y contraindicaciones para los mercados donde este producto está disponible.  $R_{x,Only}$

Aviso de publicidad: 2309132002C0066

Los productos enlistados puede que no estén disponibles en todos los mercados.

GORE, *Together, improving life*, VBX, VIABAHN y diseños son marcas registradas de W. L. Gore & Associates.  
© 2023 W. L. Gore & Associates, Inc. 231059700-ES AGOSTO 2023

W. L. Gore & Associates, Inc.  
[goremedical.com](http://goremedical.com)

Asia Pacific +65 67332882 Australia / New Zealand 1800 680 424 Europe 00800 6334 4673  
United States Flagstaff, AZ 86003 800 437 8181 928 779 2771

