

# Fechamento do forame oval patente (FOP)

## Acompanhamento e recuperação

Essas informações poderão ajudá-lo a prever o que esperar no dia e no dia seguinte do procedimento de fechamento do FOP e quais serão suas consultas de acompanhamento e níveis de atividades posteriores.

### Protocolo de vista de acompanhamento pós-procedimento

#### Antes da alta

- Exame físico, TTE

#### 1 mês

- Exame físico, TTE

#### 6 meses

- Exame físico, TTE

#### 12 meses

- Exame físico, TTE\*

### Protocolo de terapia médica no tratamento pós-procedimento

#### Dia 1 e depois

- Uma das seguintes opções de antiplaquetários:

ASPIRIN® (ácido acetilsalicílico) (81 a 325 mg diariamente)

Combinação:

ASPIRIN® (ácido acetilsalicílico) 50 a 100 mg diariamente com dipiridamol 225 a 400 mg diariamente

Clopidogrel (isolado) 75 mg diariamente

- A terapia antiplaquetária deverá ser usada indefinidamente

Você deverá tomar os antibióticos adequados consistentes com os procedimentos de rotina do médico, depois da implantação do dispositivo.

### Nível de atividade do paciente pós-procedimento

#### Dia 1

- Descanso no hospital por até um dia

#### Dia 14 e depois

- Retomada de todas as atividades normais

Acompanhamento e recuperação baseados no estudo clínico Gore REDUCE.<sup>†</sup>

\* Em casos em que a estabilidade do dispositivo está em questão, o exame fluoroscópico sem contraste é recomendado

† Protocolos baseados no estudo REDUCE

TTE: ecocardiograma transtorácico

Profilático: Um medicamento ou ação usado para evitar uma doença

É importante falar com o médico sobre os possíveis benefícios e riscos do fechamento do forame oval patente.

Saiba mais no [AboutPFO.com](http://AboutPFO.com) e pergunte ao médico se o fechamento do forame oval patente é o melhor para você.



**INDICAÇÕES PARA USO NOS EUA:** O oclisor septal GORE® CARDIOFORM é um dispositivo implantado permanentemente indicado para o fechamento percutâneo por transcaterter das seguintes comunicações interatriais: comunicações interatriais (CIAs) do ostium secundum; forame oval patente (FOP) para reduzir o risco de AVC isquêmico recorrente nos pacientes, predominantemente entre as idades de 18 e 60 anos, que tenham tido um AVC criptogênico devido a uma suposta embolia paradoxal, conforme determinado por um neurologista e por um cardiologista depois de uma avaliação para excluir causas conhecidas de AVC isquêmico. **CONTRAINDICAÇÕES:** O oclisor septal GORE® CARDIOFORM é contraindicado para uso em pacientes: que não podem tomar medicamentos antiplaquetários ou anticoagulantes, como aspirina, heparina ou varfarina; com anatomia em que o tamanho ou a posição do oclisor septal GORE® CARDIOFORM iria interferir com outras estruturas intracardíacas ou intravasculares, como válvulas cardíacas ou veias pulmonares; com endocardite ativa ou outras infecções que produzem bacteremia, ou pacientes com sepse conhecida em até um mês antes do implante planejado ou qualquer outra infecção que não possa ser tratada com sucesso antes da colocação do dispositivo; com trombo intracardíaco conhecido. Consulte as *Instruções de Uso* em [goremedical.com](http://goremedical.com) para obter a descrição completa de todos os avisos, precauções e eventos adversos. Rx Only

Essas informações devem ser usadas apenas para educação e conscientização. Os pacientes devem consultar o médico para obter informações sobre os riscos associados aos dispositivos e procedimentos cirúrgicos discutidos neste documento. Todos os procedimentos cirúrgicos têm possíveis riscos à saúde. Nem todos os pacientes serão candidatos para tratamento com esses dispositivos e os resultados individuais podem variar.

Sempre siga o conselho do médico no tratamento e recuperação pós-cirúrgicos.

Atenção: A lei dos EUA restringe o uso deste dispositivo apenas a pedido de um médico (Rx).

Os produtos listados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

ASPIRIN é marca comercial da Bayer.

GORE, *Together, improving life*, CARDIOFORM e designs são marcas registradas da W. L. Gore & Associates.

©2019 W. L. Gore & Associates, Inc. OUTUBRO DE 2019

W. L. Gore & Associates, Inc.  
Flagstaff, AZ 86004  
T 800 437 8181 T 928 779 2771 [goremedical.com](http://goremedical.com)

*Together, improving life*

